

LETKURAVINNON ANTO FLOCARE-SIIRTOLAITTEELLA

KUN KÄYTÖSSÄ ON INFINITY-SYÖTÖPUMPPU

Flocare Infinity -pumppusiirto- laitteen täyttäminen:

- Tarkista, että letkuravintovalmiste on hieman pumppua ylempänä tai käytä laitteistolle tarkoitettua telinettä
- Pumpkaa tippakammioon pari painallusta ravintovalmistetta
- Täytä ravinnonsiirtolaite Fill Set -toimintoa käyttämällä

Annostelun aloittaminen:

- Ennen kuin aloitat syötön, huuhtelee syöttöletku vedellä (n. 10–40 mm)
- Liitä ravinnonsiirtolaite syöttöletkuun
- Ohjelmoi annostelu ja käynnistä pumppu

Ravintovalmistepakkauksen vaihtaminen:

- Pysäytä pumppu vaihdon ajaksi
- Huuhtelee letku 10-40 ml vedellä
- Liitä uusi ravintovalmistepakkaus heti siirtolaitteeseen tyhjentyneen pakkauksen tilalle
- Täytä tarvittaessa siirtolaite Fill set -toiminnosta
- Käynnistä pumppu (asetukset säilyvät muistissa)

**Siirtolaitteiden tilavuus on 18 ml,
reppusiirtolaitteen 14 ml.**

KÄSIVARAISESTI

(käsivaraisen ravinnonsiirtolaitteen kuva s. 9).

Flocare-siirtolaitteen täyttäminen:

- Tarkista, että ravintovalmistepakkaus on ripustettu vähintään noin metrin verran syöttöletkun päätä korkeammalle
- Tarkista, että lääkkeenantohaarake ja rullasulkija ovat kiinni
- Pumpkaa tippakammioon pari painallusta ravintovalmistetta (enintään puolilleen)
- Avaa rullasulkija ja täytä siirtolaite kokonaan letkuravintovalmisteella
- Sulje rullasulkija

Annostelun aloittaminen:

- Ennen kuin aloitat syötön, huuhtelee syöttöletku vedellä (n. 10–40 ml)
- Liitä ravinnonsiirtolaite syöttöletkuun
- Avaa rullasulkija
- Säädä annostelunopeus halutuksi rullasulkijalla

Ravintovalmistepakkauksen vaihtaminen:

- Sulje rullasulkija
- Huuhtelee letku 10–40 ml vedellä
- Liitä uusi ravintovalmistepakkaus heti siirtolaitteeseen tyhjentyneen pakkauksen tilalle
- Aloita ravinnonanto avaamalla rullasulkija ja säädä annostelunopeus sopivaksi

HUOM! Letkuruokinta-asento

- Voit pitää lasta sylissä ruokinnan ajan
- Sängyssä ollessa on hyvä kohottaa lapsi puoli-istuvaan asentoon esim. parin tyynyn avulla. Jos lapsi pystyy liikkumaan, voidaan letkuravitsemus toteuttaa istuen tai seisten. Letkuruokintareppu mahdollistaa muunkin liikkumisen.
- Säilytä kohoasento vielä noin puoli tuntia letkuruokinnan lopettamisen jälkeen.